



AQUA INJECTOR PLUS 讓你擁有透亮肌膚

31G 9針頭 快速注射

AQUA INJECTOR PLUS 是最新的水光注射儀，採取全新技術，
締造低成本高效能的雙贏效果。
人手單針頭注射的消耗量高，痛楚度強，而且持久性低，性價比低。
相對自動化注射儀能夠大幅減低人手注射帶來的不穩定因素。
如手部疲倦，致不規則的效果，以及注射期間長時間消耗單一針頭。



規格

9針針頭和無針針頭注射器

針頭：31G，9針多針頭型
針控深度：0~5mm（間隔0.2mm）
注射器類型：1cc，2cc，3cc，5cc
操作模式：間歇，連續
電壓和頻率：100~250VAC，50/60Hz
尺寸：注射器（293x33x170mm）/ 主機（310x231x142mm）
LCD屏幕：主機（7寸，觸摸屏）/ LCD（1.7寸）
重量：注射器（0.7kg）/ 主機（2.8kg）
注射時間：0.5秒/ 1秒/ 連續
LED：紅/ 藍
注射：沖壓式



採用最新技術的特殊功能

自動感應針筒系統調整至準確的注射劑量
自動活塞向後移動可大幅減低產品損失
強勁的真空效果以及快速注射從而減低疼痛感
保證雙重安全及衛生的注射
槍型手握帶來穩定的注射效果





全新多點注射儀

直接注射醫學美容產品進入真皮層，特別是含有透明質酸200至300倍的高水份

準確的劑量注射

市面上有很多注射儀都沒有設置1CC注射器的直徑和長度，只設置注射器長度是不足以確定注射劑量的。AQUA INJECTOR PLUS 有保存這3個值的系統，因此自動檢測注射器類型，可精確知道注入的劑量。

強大的真空效果及快速注射減低痛楚感

強烈的痛楚讓人放棄多針注射器護理。AQUA INJECTOR PLUS具有強大的真空效果及快速注射，將疼痛感減至最低。

保證雙重安全及衛生的注射

於針頭下採用一次性過濾器，發揮最大的過濾效果。主體內部也有過濾器，形成雙重過濾系統。很多同類型的水光注射儀都有產品漏入槍身的問題，讓使用者頭痛不已。AQUA INJECTOR PLUS設計為完成互鎖的外殼，防止產品滲漏到槍內。為了安全地保護基本部件，我們在吸入軟管提供了一個獨立空間，並將電機遠離噴槍背面的針，有效防止產品泄漏而導致部件損壞的問題。

自動活塞向後移動 –大幅減低產品損失

注射後自動活塞向後移動以防止產品損失

使用槍型手柄穩定注射

在操作過程中，倘若注射器被震動時，可能會傷害血管。採用腳踏開關，操作員可以用雙手握住槍部。AQUA INJECTOR PLUS槍式手柄給予足夠的壓力以保持針頭處於精確的角度以穩定注射，並防止手部抖動。可以減少血液流出，瘀傷和水腫。



9針針頭和無針針頭注射器 Air Shower + HFE System



針頭注射



無針注射

印記類型溶液注入

- 利用印章式無針注入溶液

無痛開孔

- 高度集中的電穿孔打開毛孔並關閉

溶液噴射式


- 使用空氣動力噴射溶液，以均勻地塗抹所有區域

藍光和紅光療程

- 藍光針對痤瘡及暗瘡護理
- 紅光加速血液循環，有助於膠原蛋白再生

專業進行導入

- 完成其他療程後，可使用AQUA INJECTOR PLUS進行塗抹，作無痛護理步驟，為客戶提升療程級數，更顯專業及修護效果。

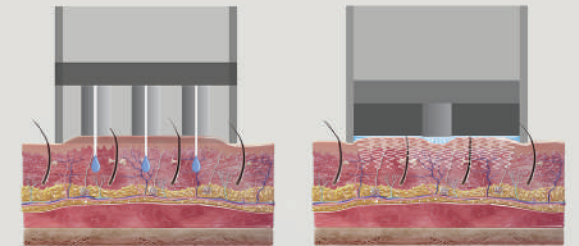

針頭注射

無針注射

